

Praktický postup pro efektivní odsátí hlenů u dítěte

Smrkání se může na první pohled zdát stejně samozřejmé jako kýchání nebo kašel, ale téměř všichni rodiče potvrdí, že tomu tak není. Děti se naučí smrkat přibližně ve věku 1,5 roku, výjimkou ale nejsou ani děti, které neumí smrkat ještě ani v pěti letech.

Hromadění hlenů zhoršuje dýchání, vyřazuje filtrační funkci nosu a vytváří živnou půdu pro množení bakterií. Zvlášť velký problém představuje rýma u kojenců, kteří nemohou sát i dýchat ústy zároveň, a proto při rýmě často odmítají kojení.

U dětí, které neumí smrkat, je proto potřebné hleny odsávat. Konstrukce odsávačky Baby-Vac 2 tlumí podtlak vysavače na bezpečnou míru, proto nejsou namíště žádné obavy. Dlouhodobý a stejnoměrný tah dokáže mnohem lépe a rychleji odsát i hleny hluboko v nosních dutinách. Na rozdíl od balonkových nebo ústních (hadičkových) odsávaček, které vytvářejí podtlak v pulsech, se Baby-Vac nezavádí hluboko do nosu a hleny jsou odsáty při jednom přiložení. Efektivitu odsávání hlenů lze zvýšit současným výplachem nosních dutin hypertonickým roztokem ve spreji nebo ampulích.

1. Sestavte odsávačku vložením nástavce do jímky.
2. Adaptér vložte do hadice vysavače. Použijte elektronickou regulaci vysavače nebo otevřete okénko na hubici a tím upravte tah podle hustoty hlenů.
3. Prvním odsátím hlenů odstraňte z největší části volně pohyblivé hleny z nosní dutiny. Dítě lze odsávat v náručí nebo vleže na zádech. Ústa by měla být otevřená.
4. Aplikujte hypertonickou vodu do obou nosních dírek a nechte ji působit 2 až 3 minuty. Hleny se zředí a osmotickým působením se sníží otok sliznice, čímž se uvolní ucpaný nos.
5. Odsajte hleny ze zprůchodněných dutin.
6. Do takto vyčištěné nosní dutiny aplikujte kapky s vazokonstrikčními látkami, které zajistí další oplasknutí sliznice. Nechejte je cca 5 minut působit.
7. Naposledy odsajte hleny a zbytky nosní vody.

Aplikování léčivých nosních kapek na vyčištěnou a oplasknutou sliznici má větší efektivitu, protože účinné látky působí přímo na nosní sliznici a nejsou ředěny hleny. Chtějte bezpečnost a kvalitu - odsávačka je zdravotnickou pomůckou s TUV certifikátem.

Dovozce odsávačky Baby-Vac

Morchella s.r.o.
Tovární 1112
537 01 Chrudim
www.babyvac.cz



Váš prodejce odsávačky:

